

Les différentes alarmes

Avant de regarder le type d'alarme, **toujours vérifier l'étanchéité du circuit**, c'est-à-dire vérifier si les connexions des tubulures sont toujours bien faites et les resserrer si nécessaire. **Il y en a 2** : au niveau du **boîtier** et au niveau de la **connexion entre le pansement et la tubulure**. Par la suite ne pas oublier d'appuyer sur le **bouton orange** pour relancer l'aspiration.

Si malgré cela, le mécanisme ne fonctionne pas :

Voyant 1 = pansement décollé. Vérifier si il n'y a pas une fuite, recoller de l'Opsite sur la fuite, objectiver et appuyer sur le **bouton orange** pour relancer l'aspiration.

- > Si le voyant « OK » **clignote vert c'est que tout est en ordre.**
- > Appliquer ensuite la coque de protection transparente pour accrocher le boîtier à la ceinture.

Voyant 2 = pansement saturé. Regarder le pansement et s'il y a une tache jusqu'à la pastille et tout en-dessous, **c'est que le pansement doit être changé.** Si le pansement est saturé **après 3 jours c'est normal** car le pansement reste en place 3 à 4 jours. Tandis que si le pansement est saturé après 1 jour, il faut savoir si c'est du sang ou des sécrétions et comprendre la raison de cet exsudat. **Si la plaie est trop exsudative, le PICO n'est pas approprié.**

Voyant 3 = batterie faible. Les piles sont presque plates ou plates à 100%. Il faut les changer, avec 2 piles AA. **Attention de bien faire la différence entre la machine qui s'arrête après 7 jours et des piles plates.**


EN CAS D'URGENCE

Le service des soins de plaies est disponible en semaine de **9h à 15h30** au **081 72 69 15**. Le call center vous redirigera vers un.e infirmier.ère.

Si un problème survient en dehors de ces horaires, retirez le pansement (devenu non-aspiratif) et mettez un autre pansement pour éviter la macération. Suivez bien les instructions données dans ce dépliant.

PICO 7 pour les soins infirmiers à domicile

Brochure d'explication

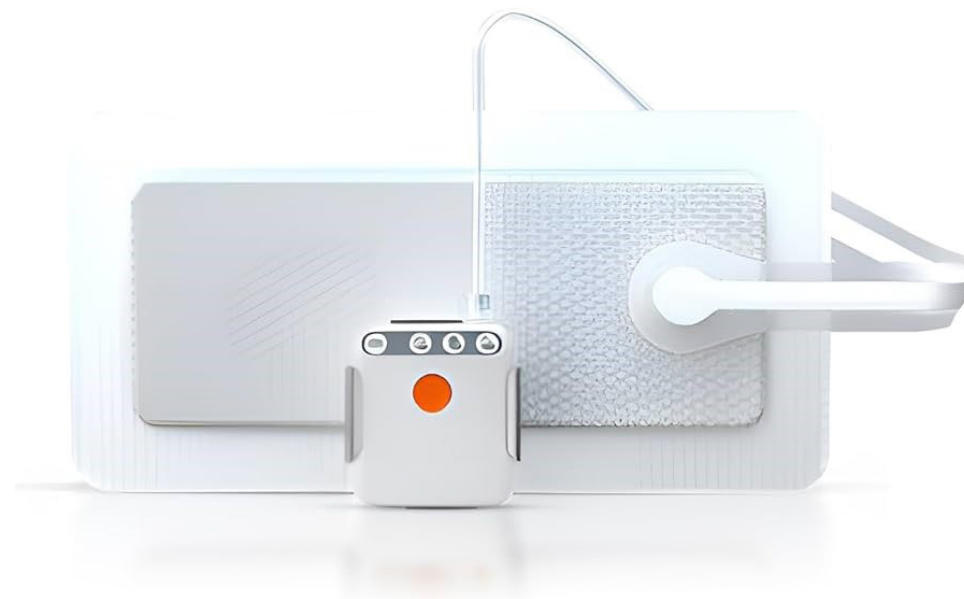

Explication du PICO

Le PICO est un traitement à pression négative ambulatoire.

Le traitement par pression négative est un traitement qui améliore l'oxygénation des tissus, diminue la tension sur la peau et favorise le rapprochement de berges tout en régulant l'humidité de la plaie.

Composition de la boîte PICO 7

- > 1 boîtier (moteur)
- > 2 piles AA
- > 1 tubulure raccord pansement du boîtier
- > Cache du boîtier avec attache pour pantalon ou ceinture
- > 2 sets complets contenant : 1 pansement actif et de l'Opsite (film polyuréthane) pour le pourtour

Indication du PICO

- > Les plaies moyennement exsudatives
- > Les plaies propres
- > Les plaies bourgeonnantes
- > Les plaies peu ou pas fibrineuses
- > Les plaies non infectées
- > Plaie profonde de maximum 1 cm

Déroulement du soin

- > Nettoyer la plaie au sérum physiologique + désinfection si demandé.
- > Sécher la plaie.
- > Déballer le kit (boîte en carton).
- > Monter le moteur, c'est-à-dire, mettre les piles dans le boîtier et connecter la tubulure au boîtier.
- > Déballer un des deux sets contenant le pansement actif et l'Opsite.

- > Appliquer le pansement actif sur la plaie en ayant enlevé le film de protection au préalable. **Tout en faisant bien attention de placer la pastille aspirative en dehors de la plaie et vers le haut.** C'est la pastille qui détecte si le pansement est saturé. Si celle-ci est placée sur la plaie, elle se déclenchera très rapidement. Les bords du pansement doivent être le plus plat possible pour que l'étanchéité soit la meilleure.
- > Appliquer de l'Opsite sur tout le pourtour pour rendre le pansement occlusif. L'Opsite se présente en languette. Il peut être découpé.
- > Connecter la tubulure du pansement à celle du boîtier.
- > Activer le moteur en appuyant sur le **bouton orange**.
- > La machine se met en aspiration, le pansement se durcit et épouse le lit de la plaie et le voyant « OK » **clignote vert**.
- > Si la machine ne se met pas en aspiration et qu'un des voyants clignote, **il faut vérifier l'étanchéité du pansement**. Coller à nouveau de l'Opsite si nécessaire et relancer la machine.
- > Si besoin, appuyer légèrement sur le pansement pour aider à la mise sous aspiration.
- > Si le voyant « OK » **clignote vert c'est que tout est en ordre**.
- > Appliquer ensuite la coque de protection transparente pour accrocher le boîtier à la ceinture.

Quand contacter le service des soins de plaies ?

Référez-vous d'abord à votre infirmier.ère à domicile. Ensuite, contactez-nous en cas de :

- > Plaie de plus en plus douloureuse.
- > Pansement saturé en 1 jour.
- > Une aspiration constante de l'appareil même après avoir recollé l'Opsite.
- > Si la peau est plus rouge autour de la plaie.
- > Si la plaie est mal odorante lors de la réfection du pansement.